

Vendaje absorbente antimicrobiano TrioMed

USO PREVISTO

El vendaje absorbente antimicrobiano TrioMed es un vendaje desechable, de un solo uso y envasado individualmente, indicado como vendaje de fijación primaria para una amplia gama de heridas o como vendaje secundario para cubrir o asegurar objetos. El vendaje está tratado con un antimicrobiano patentado a base de yodo para proteger la superficie externa del deterioro microbiano. Hipoalergénico.

INSTRUCCIONES:

El producto puede utilizarse hasta 5 días, o según las instrucciones del profesional médico o de enfermería.

El producto tiene una vida útil de 5 años.

Solo para uso externo.

De un solo uso. Una vez retirado, debe desecharse porque ya no se adhiere adecuadamente a la piel.

Aplíquelo sobre la piel limpia, seca y sin grasa ni cremas.

Limpie suavemente la herida y seque la piel alrededor de ella. Retírelo del envase, quite el papel protector y colóquelo en la zona correspondiente.

Almacénelo a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa.

Deseche el producto de acuerdo con la normativa de su país.

CONTRAINDICACIONES

Suspenda su uso y consulte a un médico si se manifiesta irritación o sensibilidad.

Este producto contiene yodo, por lo que no debe ser utilizado por personas con hipersensibilidad conocida al yodo.

ADVERTENCIAS:

El producto ayuda a proteger contra ciertas partículas contaminantes, pero no elimina la exposición ni el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.

Cualquier incidente grave que se produzca durante el uso de este dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad nacional relevante.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

No citotóxico, sin látex y no inflamable.

La capa activa exterior con tecnología antimicrobiana TrioMed (a base de yodo) sirve para proteger la superficie externa del deterioro microbiano. El yodo está embebido en la superficie externa, por lo que no se lixivia ni se desprende del material. Su finalidad es inactivar las bacterias y los virus cuando entran en contacto con él.

	 	Obelis S.A. Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2 732-59-54 Fax: +(32) 2 732-60-03 mail@obelis.net	 	I3 BioMedical Inc. 14163 boul. Curé Labelle Suite 50 Mirabel, Québec, Canada J7J 1M3 WWW.I3BIOMEDICAL.COM
---	--	--	--	---