

## Nastro Adesivo Medicaie Antimicrobico TrioMed: Polimero Poroso

### DESTINAZIONE D'USO

Il Nastro Adesivo Medicaie Antimicrobico TrioMed: Polimero Poroso è un dispositivo monouso per il fissaggio generale di medicazioni per ferite, cannule o qualsiasi altro dispositivo. Il nastro è trattato con un antimicrobico brevettato a base di iodio per proteggere la superficie esterna dal deterioramento microbico. Resistente all'acqua. Ipoallergenico.

### ISTRUZIONI:

Il prodotto può essere indossato fino a 3 giorni o per il periodo indicato dal proprio infermiere/medico..

Il prodotto ha una durata di conservazione di 3 anni.

Solo per uso esterno.

Monouso. Dopo la rimozione deve essere scartato in quanto non aderisce più alla cute adeguatamente.

Applicare su cute pulita, asciutta e priva di oli e creme.

Pulire e asciugare l'area della cute su cui si intende applicare il prodotto.

Srotolare la lunghezza di nastro adesivo medicaie desiderata per preservare l'adesione, evitare il più possibile di toccare l'area adesiva del nastro.

Personalizzare le dimensioni e la forma del nastro in base ai requisiti dell'applicazione.

Iniziare ad applicare un'estremità del nastro sulla cute del paziente. Evitando di allungare e di tirare il nastro, applicare il segmento di nastro restante e assicurarsi che aderisca adeguatamente, senza grinze o aree non aderenti.

Conservare a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare diretta.

Smaltire secondo le norme del proprio paese.

### CONTROINDICAZIONI:

Interrompere l'uso e consultare un medico in caso di sviluppo di irritazione o di sensibilità.

Questo prodotto contiene iodio, non deve essere usato da persone con accertata ipersensibilità allo iodio.

### AVVERTENZE:

Il prodotto aiuta a proteggere contro alcune particelle contaminanti ma non elimina il rischio di contrarre malattie e infezioni.

Qualsiasi incidente grave verificatosi durante l'uso di questo dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'ente nazionale competente.

### BENEFICI DEL PRODOTTO

Lo strato esterno attivo con la tecnologia antimicrobica TrioMed (a base di iodio) serve a proteggere la superficie esterna dal deterioramento microbico. Lo iodio è incorporato nella superficie esterna e quindi non può percolare o fuoriuscire dal materiale, il suo scopo è di rendere inattivi i batteri e i virus quando entrano in contatto con la superficie.

	 	<b>Obelis S.A.</b> Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2 732-59-54 Fax: +(32) 2 732-60-03 mail@obelis.net	 	<b>I3 BioMedical Inc.</b> 14163 boul. Curé Labelle Suite 50 Mirabel, Québec, Canada J7J 1M3 WWW.I3BIOMEDICAL.COM
---	--	--	--	---