

TrioMed Active chirurgische und medizinische Maske

VERWENDUNGSZWECK:

Der Hauptverwendungszweck dieser chirurgischen Maske ist das Verhindern der Verbreitung einer Kontamination durch den Träger. Die TrioMed Active chirurgische und medizinische Maske ist eine Einweggesichtsmaske zum Schutz des Patienten vor Kontamination durch Mikroorganismen, Körperflüssigkeiten und Schwebstoffe in der Luft.

ANLEITUNGEN:

Das Produkt kann während einer 8-stündigen Arbeitsschicht ununterbrochen getragen werden.

Das Produkt hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften entsorgen.

GEGENANZEIGEN:

Bei Reizung oder Überempfindlichkeit die Anwendung abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

Dieses Produkt enthält Jod. Es sollte nicht von Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Jod verwendet werden.

WARNHINWEISE:

Das Produkt trägt zum Schutz vor bestimmten partikelförmigen Verunreinigungen bei, beseitigt jedoch nicht die Bloßstellung oder das Risiko einer Ansteckung mit der Erkrankung oder Infektion.

Alle schwerwiegenden Vorfälle, die sich bei der Verwendung dieses Produkts ereignen, sind dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde zu melden.

PRODUKTVORTEILE:

Nicht zytotoxisch, latexfrei und nicht entflammbar

Die äußere aktive Schicht mit der antimikrobiellen TrioMed-Technologie (auf Jodbasis) dient dem Schutz der äußeren Oberfläche vor mikrobieller Schädigung. Das Jod ist in die äußere Oberfläche eingebettet und laugt daher nicht aus oder tritt aus dem Material aus. Es dient dazu, Bakterien und Viren unschädlich zu machen, wenn sie damit in Berührung kommen.

WIE IST DIE MASKE ANZULEGEN?

- Entnehmen Sie eine Maske aus der Verpackung oder dem Beutel und vergewissern Sie sich, dass die Maske auf beiden Seiten keine sichtbaren Risse oder Löcher aufweist.
- Bestimmen Sie, welche Seite der Maske die Oberseite ist. Die Seite der Maske, die einen steifen, biegsamen Rand hat, ist die Oberseite und soll sich an die Nasenform anpassen.
- Bestimmen Sie, welche Seite der Maske die Vorderseite ist. Die Vorderseite ist die Seite mit der aufgeprägten Markierung „OUT“. Die farbige Seite der Maske ist in der Regel die Vorderseite und sollte von Ihnen weg zeigen, während die weiße Seite das Gesicht berührt.
- Halten Sie die Maske an den Ohrschlaufen fest. Legen Sie eine Schlaufe um jedes Ohr.
- Formen oder drücken Sie den steifen Rand an die Form Ihrer Nase an.
- Ziehen Sie den unteren Teil der Maske über den Mund und das Kinn.