

Maschera Chirurgica e Medica TrioMed Active

DESTINAZIONE D'USO

Lo scopo principale di questa maschera chirurgica è di impedire all'indossatore di diffondere contaminazione. La Maschera Chirurgica e Medica TrioMed Active è una maschera facciale monouso per la protezione del paziente da contaminazione da microrganismi, fluidi corporei e materiali particellari a trasmissione aerea.

ISTRUZIONI:

Il prodotto può essere indossato ininterrottamente per un turno di lavoro da 8 ore.

Il prodotto ha una durata di conservazione di 5 anni.

Solo per uso esterno.

Conservare a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare diretta.

Smaltire secondo le norme del proprio paese.

CONTROINDICAZIONI:

Interrompere l'uso e consultare un medico in caso di sviluppo di irritazione o di sensibilità.

Questo prodotto contiene iodio, non deve essere usato da persone con accertata ipersensibilità allo iodio.

AVVERTENZE:

Il prodotto aiuta a proteggere contro alcune particelle contaminanti ma non elimina il rischio di contrarre malattie e infezioni.

Qualsiasi incidente grave verificatosi durante l'uso di questo dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'ente nazionale competente.

BENEFICI DEL PRODOTTO:

Non citotossico, privo di lattice e non infiammabile

Lo strato esterno attivo con la tecnologia antimicrobica TrioMed (a base di iodio) serve a proteggere la superficie esterna dal deterioramento microbico. Lo iodio è incorporato nella superficie esterna e quindi non può percolare o fuoriuscire dal materiale, il suo scopo è di rendere inattivi i batteri e i virus quando entrano in contatto con la superficie.

COME INDOSSARE LA MASCHERA

- Rimuovere la maschera dalla scatola o dal sacchetto e verificare che non siano presenti lacerazioni o fori evidenti su entrambi i lati della maschera.
- Determinare quale lato della maschera è quello superiore. Il lato della maschera munito di bordo duro pieghevole è il lato superiore, serve ad adattare la maschera alla forma del naso dell'indossatore.
- Determinare quale lato della maschera è quello frontale. Il lato frontale è munito di marcatura in rilievo "OUT" (FUORI). Generalmente il lato colorato della maschera è il lato frontale che va posizionato lontano dall'indossatore, mentre il lato bianco tocca il viso dell'indossatore.
- Mantenere la maschera afferrando i supporti ad anello per orecchie. Posizionare un anello intorno a ciascun orecchio.
- Plasmare o stringere il bordo rigido per adattarlo alla forma del naso dell'indossatore.
- Abbassare la parte inferiore della maschera fino a coprire la bocca e il mento.